



Mögliche Primärbehälter: Probenröhrchen, flüssigkeitsdichter Plastikbehälter
 Mögliche Sekundärbehälter: Plastiksack, Röhrchen, Plastikbox, verschliessbare Dose. Genügend absorbierendes Material beigegeben.

Aussenverpackung: Kartonschachtel, gefüttertes Couvert

Wichtig: Sekundärbehälter oder Aussenverpackung muss fest sein!

Paket muss mit Kleber UN3373 (für diagnostisches Material) gekennzeichnet werden.
 Kleber auf A4 [Klebeetiketten-Format](#) ausdrucken oder bestellen bei:

Swiss TS Technical Services AG
 Richtistrasse 15
 8304 Wallisellen
 Tel: +41 44 877 62 22
 info@swisststs.ch